

NDC# 68400-203-18



Hemox-A

Solución Hemostática Coagulante

Para uso tópico dental

RxOnly

PARA USO PROFESSIONAL

HEMOX-A

Hemostático Solución Tamponada

DESCRIPCION:

Solucion Hemox-A es una solucion astringente a base de cloruro de aluminio. La retracion gingival puede ser lograda utilizando un hilo retractor gingival humedecido con la Solucion Hemox-A.

PRECAUCIONES:

Descontinuar el uso de este producto en caso de irritacion. Para uso topico unicamente. Evitar contacto con los ojos.

BENEFICIOS:

La solucion Hemox-A paraliza la hemorragia rapidamente. Si el margen gingival es dañado durante la preparación de la pieza o mientras se coloca una banda matriz o una banda cervical, humedecer el area con la

solucion Hemox-A la cual controlara la hemorragia inmediatamente. Solucion Hemox-A no contiene epinefrina. El uso de vasos constrictores para retracciones gingivales y hemorragias es potencialmente peligroso y debe de ser evitado. Un hilo retractor no impregnado se puede humedecer en la solucion Hemox-A y luego ser colocado en el surco gingival.

INDICACIONES:

Humedecer un isopo can la solucion Hemox-A. Aplicar con presion en el area de la hemorragia hasta que la misma cese. Enjuagar con agua en caso de que se forme un coagulo oscuro. Esto no tendra ningun efecto en la accion hemastatica. Remover el hilo impregando del surco gingival. Enjuagar con agua y secar con aire. Si la hemostasis no es lograda, repetir la aplicacion, enjuagar con agua y secar con

aire hasta que la hemorragia cese completamente.

CONTRAINDICACIONES:

Este producto no debe de ser utilizado por personas hipersensitivas al cloruro de aluminio.

PRECAUCIÓN:

Mantenga fuera del alcance de niños.

PARA USO PROFESIONAL

FABRICADO PARA:

keystone[®]
i n d u s t r i e s

480 S. Democrat Rd.

Gibbstown, NJ 08027

dental.keystoneindustries.com

1-800-333-3131