

Bosworth Copaliner® gebruiksaanwijzing

Copaliner® beschermt het dentine en dringt door in, vult en dicht de tubuli af. Het isoleert tegen thermische, galvanische reacties en elektrische schokken. Omdat Copaliner zorgt voor een randafdichting tussen het dentine en amalgaam, biedt het bescherming tegen doordringing van orale vloeistoffen, micro-organismen en metaalionen van amalgaamrestauraties in de caviteit. Omdat het geen chloroform bevat, is het bijna onoplosbaar in de mond. Copaliner® is gebaseerd op ether met een biologische milde samenstelling, waardoor postoperatieve gevoeligheid tot een minimum wordt beperkt. **COPALINER KAN ALLEEN ONDER AMALGAAM WORDEN GEBRUIKT.**

1




Prepareer de caviteit volledig en isoleer de gebitselementen met een rubberdam of katoenproppen.

2




Droog het dentine grondig met perslucht.

3

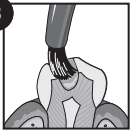


Breng met een katoenpropje, applicatorborstel of spons voldoende Copaliner aan op het geprepareerde gebitselement. Zorg dat u niet te veel materiaal aanbrengt.

4

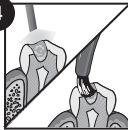

Droog de plaats voldoende met een luchtspuit, herhaal dit indien nodig en droog opnieuw. Verzadiging is herkenbaar aan een licht glanzend uiterlijk. Het is raadzaam één of twee lagen Copaliner op de preparatie aan te brengen of totdat een glanzend uiterlijk is ontstaan.

5

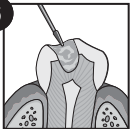

Na volledige droging brengt u het vul- of restauratiemateriaal aan.

OPMERKINGEN

- Om mogelijke kruisbesmetting te voorkomen, mag een gebruikte applicator niet meer in de Copaliner-fles worden gestoken. Als het product niet correct is aangebracht, kan de lak met een scherp mesje of oplosmiddel worden verwijderd. Als de lak lijkt te verdikken en/of van kleur verandert, kan de consistentie door toevoeging van oplosmiddel worden verdund, waarna de lak weer de oorspronkelijke kleur aanneemt zonder aantasting van de fysieke eigenschappen.
- Gebruik Copaliner in een goed geventileerde ruimte.
- Copaliner-flessen dienen vóór opslag goed te worden afgesloten en hoeven niet in de koelkast te worden bewaard.
- Copaliner mag niet worden gebruikt onder compositie-, glasionomeer- of harrestauraties omdat het de uithardingsreactie beïnvloedt.

VOORZICHTIG: Sommige personen kunnen gevoelig zijn voor producten die kopalhars bevatten.

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (MIB) voor voorzorgsmaatregelen voor een veilige hantering en de juiste afvoer. (www.keystoneindustries.com/en/msds)